

Caregyn

Emulgel



Composizione:

Acqua, Glicerina, Pantenolo, Acido ialuronico, Carbomer, Gliceril stearato, Cetyl Palmitato, Dicapril etere, Ceramidi, Tetra-di-terz-butil-4-idrossifenil proprionato di pentaeritritolo, Tocoferoli, Vitamina E acetato, Vitamina F, Olio Argan, Olio di Rosa Mosqueta, Olio di silicone, EDTA bisodico, Sodio metabisolfito, Trietanolamina, Fenossietanolo, Etilsilglicerina, Elastina idrolizzata, Estratto acquoso di Quercia, Propilen glicole dicaprilato/dicaprato, Propanediolo, Estratto di Succiamela maggiore.

Indicazioni terapeutiche:

CAREGYN EMULGEL è un dispositivo medico che unitamente ad una corretta ginnastica perineale, aiuta a mantenere e a recuperare l'elasticità, il tono del tessuto perineale nonché è utile nel prevenire la formazione delle smagliature.

Posologia e modo di somministrazione:

Bustina monodose 5 ml: Detersi accuratamente le mani ed applicare il contenuto di una bustina massaggiando con delicatezza con movimenti circolari sulla parte interessata una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi.

Tubo da 100 ml: Detersi accuratamente le mani ed applicare il contenuto di circa 5 ml massaggiando con delicatezza con movimenti circolari sulla parte interessata almeno una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi.

Non risciacquare. È consigliato l'uso continuativo a partire dal sesto mese di gravidanza. Riprendere l'applicazione 1 mese dopo il parto per un periodo di tre mesi.

Conservazione:

Conservare a temperatura ambiente. Conservare la confezione ben chiusa e a riparo da fonti di calore.

Controindicazioni:

Non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza. Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

L'uso specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Avvertenze:

Il dispositivo non è soggetto a particolari precauzioni di utilizzo, si avverte, comunque:

- In caso di episiotomia il prodotto non può essere applicato prima di una ottimale cicatrizzazione delle zone interessate.
- **Caregyn Emulgel Monodose:** utilizzare una sola volta al giorno. L'uso in più momenti di una singola bustina può portare a effetti collaterali non prevedibili.
- **Caregyn Emulgel Pluridose:** non utilizzare il prodotto oltre i 30 giorni dalla sua prima apertura. L'uso oltre i 30 giorni può portare a effetti collaterali non prevedibili.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non impiegare su lesioni aperte (ferite) o mucose.
- Tenere lontano dagli occhi.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
- In caso di reazione avversa, irritazioni e prurito sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia.
- Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Interazioni ed incompatibilità:

L'uso contemporaneo di altri preparati topici sulla stessa area di applicazione potrebbe causare il mancato assorbimento dei componenti, il peggioramento delle proprie condizioni o altri effetti collaterali non prevedibili.

Presentazione:

CAREGYN EMULGEL monodose: bustine monodose da 5 ml in confezioni da 2, 12, 20 o 30 bustine.

CAREGYN EMULGEL pluridose: confezione contenente 1 tubo da 100 ml.

 Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1
25124 Brescia



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

BARCODE



100 ml

Caregyn
Emulgel



FT/CE/152.100/A00

Fabricante:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)



CAREGYN EMULGEL è un dispositivo medico che unitamente ad una corretta ginnastica perineale, aiuta a mantenere e a recuperare l'elasticità, il tono del tessuto perineale nonché è utile nel prevenire la formazione delle smagliature.

Composizione: Acqua, Glicerina, Pantenolo, Acido ialuronico, Carbomer, Gliceril stearato, Cetyl Palmitato, Dicapril etere, Ceramidi, Tetra-di-terz-butil-4-idrossifenil propionato di pentaeritritolo, Tocoferoli, Vitamina E acetato, Vitamina F, Olio Argan, Olio di Rosa Mosqueta, Olio di silicone, EDTA bisodico, Sodio metabisolfito, Trietanolamina, Fenossietanolo, Etilesilglicerina, Elastina idrolizzata, Estratto acquoso di Quercia, Propilen glicole dicaprilato/dicaprato, Propanediolo, Estratto di Succiamela maggiore.

Posologia e modo di somministrazione: Detersi accuratamente le mani ed applicare il contenuto di circa 5 ml massaggiando con delicatezza con movimenti circolari sulla parte interessata almeno una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi. Non risciacquare.
È consigliato l'uso continuativo a partire dal sesto mese di gravidanza.
Riprendere l'applicazione 1 mese dopo il parto per un periodo di tre mesi.

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente. Conservare la confezione ben chiusa e a riparo da fonti di calore.

Avvertenze e Controindicazioni: leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Caregyn
Emulgel

